



Instructiekaart


Versie 2

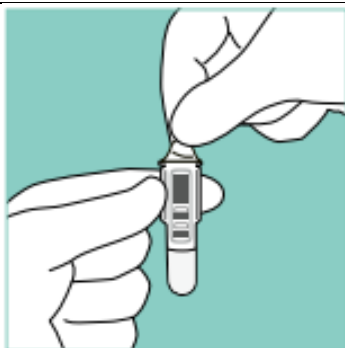


Verwijder de afdichtfolie van de cuvet. Raak de doorzichtige oppervlakken van de cuvet (optisch gedeelte) niet aan.

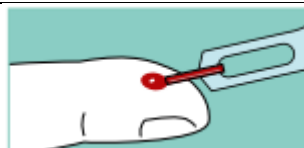


Haal een sample collector uit de verpakking. Houd de sample collector bijna horizontaal en plaats de punt net onder het oppervlak van de bloeddruppel. Vul het capillaire deel volledig.

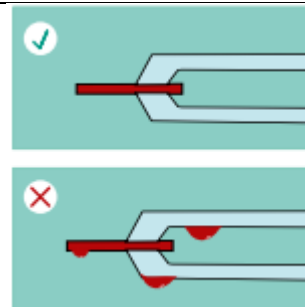

Controleer of het capillair volledig gevuld is **zonder** luchtbelletjes. Veeg de sample collector niet af! Zit er bloed aan de buitenkant, gooi deze dan weg en neem een nieuwe.

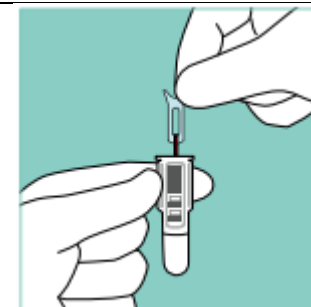


Plaats de sample collector binnen 2 min. in de cuvet

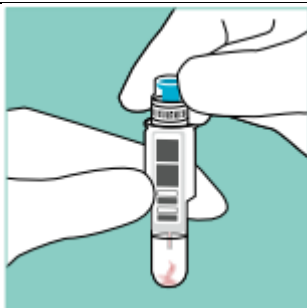

Sluit de cuvet met de reagens dop. Druk niet op het blauwe deel van de dop. De cuvet is nu 2 uren houdbaar tot analyse. Cuvet rechtop houden en niet schudden.



Druk op de QuikRead go op 'Meten'.

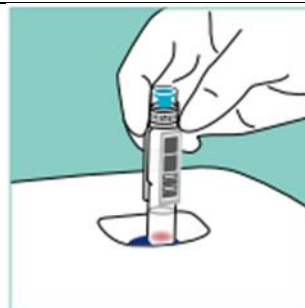

Plaats de cuvet in het apparaat met de barcode naar voren. Op het scherm is te zien hoe de analyse vordert.



Als de analyse voltooid is, verschijnt het resultaat op het scherm. De cuvet komt automatisch omhoog

Informatiecodes en problemen oplossen

Melding	Oorzaak	Te ondernemen actie
Apparaat start niet	Voeding is niet aangesloten	Sluit voeding aan en probeer opnieuw
	Elektronische storing	Bel medisch laboratorium
'Fout code XXX. Start QuikRead go opnieuw'	Er zit vocht op de optische oppervlakken	Zet het apparaat in een droge ruimte en start opnieuw
	Tijdelijke storing	Herstart het apparaat. Is probleem niet opgelost, bel medisch laboratorium
'Fout code XXX. Neem contact op met Customer Service'	Permanente storing	Bel medisch laboratorium
'Cuvetpositie niet correct'	Er is verpakkingsmateriaal achtergebleven aan de cuvet	Verwijder de cuvet, zodra die omhoog gekomen is. Controleer en verwijder eventuele restanten voor de volgende meting
	Mechanische storing	Bel medisch laboratorium

Identificatiefout

Verkeerde ID-gegevens patiënt gebruikt	Direct melden bij medisch laboratorium, zodat resultaten verwijderd kunnen worden bij 'verkeerde' patiënt
--	---